



One Step-graviditetstestet är ett snabbt och enkelt test som utförs på urin. Graviditetstestet mäter halten HCG (humant koriongonadotropin) i urinen. HCG-hormonet börjar utsöndras från moderkakan i början av graviditeten. Hormonet finns i kroppen endast under graviditet. Halten HCG-hormon ökar i urinen dag för dag och på grund av detta varierar tjockleken på graviditetstestets teststreck.

Den som använder graviditetstestet bör observera att läkemedlet Pregnyl innehåller humant koriongonadotropin. Därför kan graviditetstestet visa ett falskt positivt resultat om det görs för tidigt efter intag av detta läkemedel. Läkemedlen Terolut och Clomifen påverkar inte graviditetstestets resultat.

NÄR SKA DU TA URINPROVET?

Du kan göra testet när som helst under dygnet. Det är dock bäst att göra testet på morgonurinen, då HCG-halten är som högst.

HUR SKA DU GÖRA TESTET?

1. Teststickan och urinen ska vara omkring rumstemperatur (18°C – 30°C).
2. Öppna den lufttäta förpackningen och ta fram testet.
3. Håll i testets handtag med ena handen och avlägsna skyddet i testets andra ände med den andra handen.
4. Lägg testet med den absorberande delen nedåt. Håll i testets handtag. Håll den absorberande delen i urinstrålen i 10 sekunder så att den blir helt blöt. Det andra alternativet är att doppa teststickans absorberande del i en behållare med urin i 10 sekunder.

Låt inte stickan bli blöt över pilspetsen eftersom testet då kan vara missvisande.


5. Sätt tillbaka skyddshylsan på testet och lägg teststickan på en plan, ren, torr och icke-absorberande yta (t.ex. på förpackningen).
6. Vänta tills du ser de färgade strecken i teststickans testfönster. Ett positivt resultat kan synas i testet redan efter 60 sekunder. För att försäkra dig om ett negativt resultat ska du vänta ut testets fulla reaktionstid på 6 minuter. Testresultatet är inte längre tillförlitligt om det har gått mer än tio minuter.

HUR SKA DU LÄSA AV RESULTATET?



Negativt resultat (du är inte gravid): Endast ett färgat streck syns i testfönstret. Detta betyder att du inte är gravid.

Positivt resultat (du är gravid): Två tydliga streck syns i testfönstret. Detta betyder att du är gravid. Styrkan på streckens färg kan variera eftersom halten HCG-hormon i urinen varierar under graviditetens olika faser.

Misslyckat test: Inget streck syns i testfönstret. Testa på nytt med ett nytt test.

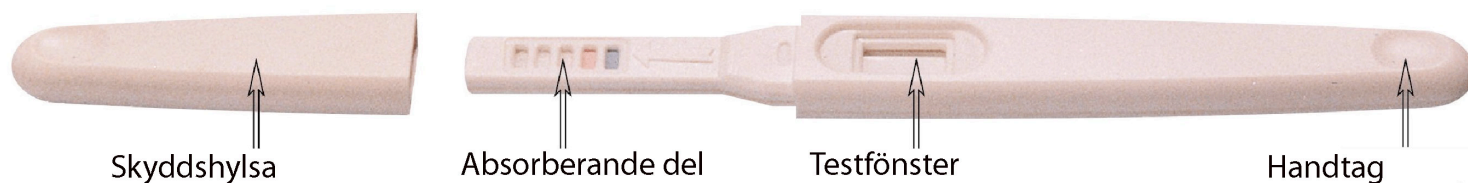

Låt inte stickan bli blöt över pilspetsen eftersom testet då inte fungerar korrekt

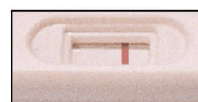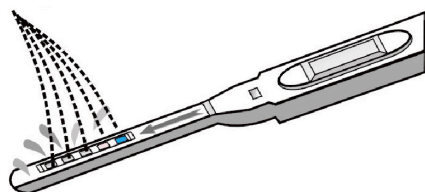

Negativt resultat
– du är inte gravid



Positivt resultat
– du är gravid

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET

Testet ska förvaras vid 4°C – 30°C i obruten förpackning. Testförpackningen ska skyddas mot direkt solljus och fukt.

Testförpackningarna har märkts med bäst-före-datum.