

Clearblue

Graviditetstest

Med veckoindikator

DIGITAL

- Om du gör testet den dag du väntar din mens, kan du testa när som helst under dagen för att ta reda på om du är gravid.
- Om du gör testet innan du väntar din mens, ska du använda morgonurin.
- För att få ett tillförlitligt resultat på veckoindikatorn måste du använda morgonurin.
- Undvik att dricka större mängder vätska innan testet.

Läs denna information noga innan du gör testet.

1 GÖR TESTET

När du är redo att göra testet, ta ut provstickan ur folieförpackningen och ta av den blå hylsan. Använd provstickan direkt.

ALTERNATIV 1

UTFÖR TESTET DIREKT I URINSTRÅLEN **ELLER** TA ETT URINPROV I EN REN OCH TORR BEHÅLLARE

- Placera den absorberande provtagningsdelen nedåtriktad i urinstrålen i **endast 5 sekunder**.
- Se till att inte resten av provstickan blir blöt.
- Om du vill kan du sedan sätta på hylsan igen, lägg sedan provstickan på en plan yta.



- Placera enbart den absorberande provtagningsdelen nedåtriktad i urinen enligt beskrivningen, i **endast 20 sekunder**.
- Om du vill kan du sedan sätta på hylsan igen, lägg sedan provstickan på en plan yta.



2 VÄNTA...

- Vänta-symbolen blinkar för att visa att testet fungerar.
- Resultatet visas när Vänta-symbolen slutar blinka. Om Vänta-symbolen inte visas efter att du har gjort testet, se fråga 6 i Frågor och svar.



Håll **aldrig** provstickan med den absorberande provtagningsdelen riktad uppåt under testet.

3 LÄS AV DITT RESULTAT

Clearblue Digital graviditetstest har en **veckoindikator** som gör en uppskattning om när befruktning skedde. Denna information visas på skärmen tillsammans med ett "Gravid"-resultat.

- Ditt resultat visas på skärmen inom **3 minuter**.
- Ett "Gravid"-resultat kan visas på skärmen **innan** veckoindikatorns resultat. **Fortsätt att vänta** tills Vänta-symbolen slutar blinka för att se ditt resultat från veckoindikatorn. Det kan ta upp till 3 minuter.
- Vissa resultat kan visas efter bara 1 minut.
- Ditt resultat ligger kvar på skärmen i cirka 24 timmar.
- Om resultatet är "Gravid", bör du kontakta din läkare som kan ge dig råd om vad du kan göra häfter. Din läkare beräknar hur långt gången din graviditet är, baserat på första dagen för din senaste mens.
- Befruktning sker ungefär två veckor innan du väntar din nästa mens. Veckoindikatorn visar en uppskattning om när befruktning skedde.
- Veckoindikatorn visar med 92 % säkerhet när befruktningen skedde. Beräkningen baseras på nivån av graviditetshormonet hCG i din urin. hCG-nivån varierar

mellan kvinnor, så det är möjligt att veckoindikatorn kan ge felaktiga resultat ibland. "Gravid"/"Inte gravid"-resultatet är mer än 99 % tillförlitligt när testet görs från den dag då mensens väntas.

Testfel

Läs stycket "Testfel" om du har använt provstickan men inget av resultaten på den här sidan visas på skärmen.

Tolkning av resultatet

Resultat	Tid sedan befruktning	Så här daterar din läkare graviditeten (baserat på en 28-dagarscykel)
Inte gravid	Resultatet är Inte gravid Se fråga 12 i Frågor och svar.	-
Gravid Risknivå 1-2	Resultatet är Gravid Befruktning skedde för cirka 1-2 veckor sedan.	3-4 veckor
Gravid Risknivå 2-3	Resultatet är Gravid Befruktning skedde för cirka 2-3 veckor sedan.	4-5 veckor
Gravid Risknivå 3-4	Resultatet är Gravid Befruktning skedde för mer än 3 veckor sedan.	5+ veckor

*Din läkare daterar graviditeten från första dagen för din senaste mens, inte från när befruktning skedde.

FRÅGOR OCH SVAR

- 1. Hur fungerar Clearblue Digital graviditetstest?**
När du är gravid producerar din kropp graviditetshormonet hCG. Mängden hCG i din kropp ökar i det tidiga skedet av graviditeten. Clearblue kan detektera mycket små mängder av detta hormon i din urin. (Testets känslighet är 25 mIU/ml.) Veckoindikatorn gör en uppskattning av när befruktning skedde baserat på hCG-nivån i din urin.
- 2. Hur tillförlitlig är Clearblue Digital graviditetstest på att upptäcka graviditet?**
Laboratorietest är Clearblue Digital graviditetstest mer än 99 % tillförlitlig på att upptäcka om du är gravid eller inte, när det används från den dag du väntade mens. Om du gör testet innan din mens väntas och får resultatet "Inte gravid", finns det ändå en viss möjlighet att du kan vara gravid. Se fråga 4.
- 3. Hur tillförlitlig är Clearblue Digital graviditetstestets veckoindikator?**
Veckoindikatorn visar med 92 % säkerhet när befruktningen skedde. Beräkningen baseras på hCG-nivån i din urin. hCG-nivån varierar mellan kvinnor, så det är möjligt att veckoindikatorn kan ge felaktiga resultat ibland. Om du gör testet mer än 6 veckor efter befruktning, kan veckoindikatorn ge övrigt resultat. Det beror på att hCG-nivån i urinen är för hög för att testet ska kunna göra en tillförlitlig uppskattning av tiden sedan befruktning.
- 4. När kan jag använda Clearblue Digital graviditetstest?**
Clearblue Digital graviditetstest kan användas fram till 4 dagar innan väntad mens. Om du gör testet innan din mens väntas och får resultatet "Inte gravid", finns det ändå en viss möjlighet att du kan vara gravid. Diagrammet nedan visar resultat från klinisk testning av Clearblue Digital graviditetstest med tidiga graviditetsprover.

Tidigt test

Clearblue rekommenderar att du testar från den dag du väntar din mens. Graviditetshormonet ökar dock snabbt i graviditetens tidiga skede, och Clearblue Digital kan användas för test fram till 4 dagar innan väntad mens. I klinisk testning med tidiga graviditetsprover visade Clearblue Digital graviditetstest följande resultat:

Antal dagar innan väntad mens	% av prover från gravida kvinnor som visade resultatet "Gravid"
-1	98%
-2	97%
-3	86%
-4	55%

Om resultatet är "Inte gravid" men graviditet ändå misstänks, se fråga 12.

Räkna ut när din mens väntas beräknat på din vanliga cykellängd genom att räkna antalet dagar från första mensdagen till dagen innan nästa mens.

- Om du har oregelbunden mens, ska du räkna på den längsta cykeln under de senaste månaderna innan testet.
- Om du inte vet när din mens väntas, rekommenderar vi att du testar tidigast 19 dagar efter ditt senaste oskyddade samlag.

- 5. Kan resultatet påverkas av mediciner eller sjukdomstillstånd?**
 - Alla alltid tillverkarens instruktioner om dina mediciner innan du gör ett test.
 - Fertilitetsbehandling som innehåller hCG kan ge missvisande resultat (dena fertilitetsbehandling ges vanligtvis genom injektioner, och om du testar för snart efter behandling kan ett felaktigt "Gravid"-resultat visas).
 - Andra fertilitetsbehandlings (som klomifencitratt), värttabletter och hormonpreventivmedel (t.ex. p-piller) bör inte påverka resultatet.
 - Om du nyligen har slutat använda hormonpreventivmedel eller om du använder fertilitetsbehandling som klomifencitratt, kan din mens bli oregelbunden vilket kan innebära att du gör testet för tidigt.
 - Om du nyligen varit gravid (även om graviditeten inte fullbordades) kan du få ett falskt "Gravid"-resultat.
 - Om du befinner dig i eller närmar dig menopaus, kan du få ett falskt "Gravid"-resultat även om du inte är gravid. I en studie med icke-gravida perimenopausala och menopausala kvinnor som testades med olika partier Clearblue Digital graviditetstest var i genomsnitt 0,2 % av resultaten "Gravid", inom ett intervall mellan 0 % till 0,5 % för olika partier. Alla falska resultat gällde kvinnor över 50 år.
 - Ektopisk graviditet och cyster på äggstockarna kan ge missvisande resultat.
 - Multipla och ektopiska graviditeter kan ge missvisande resultat från veckoindikatorn.
 - Graviditeten kan upphöra spontant i det tidiga skedet. Om du har fått resultatet "Gravid", kan det senare visa sig att du inte är gravid pga att graviditeten upphört spontant. Under dessa förhållanden kan veckoindikatorn visa övrigt resultat.
- Om du får övrigt resultat, bör du diskutera dessa med din läkare.

- 6. Jag har använt testet, men Vänta-symbolen har inte visats. Vad innebär det?**
Testet har inte fungerat som det ska. Läs stycket Testfel.
- 7. Jag har använt testet, men inget resultat visas på skärmen. Vad innebär det?**
Ditt resultat ska visas på skärmen inom 3 minuter. Om inget resultat visas, se stycket Testfel.
- 8. Enligt testet är jag gravid. Vad ska jag göra?**
Om resultatet är "Gravid", bör du kontakta din läkare som kan ge dig råd om vad du kan göra härnäst. Veckoindikatorn gör bara en uppskattning om när befruktning skedde. Din läkare beräknar hur långt gånget din graviditet är baserat på första dagen för din senaste mens. Befruktning sker ungefär två veckor innan du väntar din nästa mens.

- 9. Enligt testet är jag gravid, men jag tror inte att befruktning skett vid den tidpunkten som veckoindikatorn anger. Är det möjligt?**
Veckoindikatorn är 92 % tillförsämrade vid test med morgonurin. Vissa mediciner och sjukdomstillstånd kan påverka resultatet. Se fråga 5.
- 10. Jag gjorde testet igår och resultatet var "Gravid". Jag gjorde ett nytt test idag, och enligt veckoindikatorn har antalet veckor sedan befruktning minskat. Vad ska jag göra?**
hCG-nivån växlar i och med att den stiger, så det är möjligt att veckoindikatorn visar övrigt resultat om du gör testet två dagar i följd. Testa igen om 5 dagar och om befruktningssindikatorns resultat fortfarande visar att antalet veckor sedan befruktning har minskat, se fråga 11.
- 11. Jag gjorde testet för en vecka sedan och resultatet var "Gravid". Jag har gjort ett nytt test, och enligt veckoindikatorn har antalet veckor sedan befruktning minskat. Vad ska jag göra?**
Om du gjorde testet enligt instruktionerna, med första morgonurin vid båda tillfällena, och veckoindikatorn visade övrigt resultat, bör du kontakta din läkare.
- 12. Enligt testet är jag inte gravid. Vad ska jag göra?**
Du kanske inte är gravid, eller så kanske inte nivån av graviditetshormonet är tillräckligt hög för att kunna mätas, eller så kan du ha räknat fel på vilken dag din mens väntas.
 - Om du gjorde testet för tidigt, testa igen när du väntar din mens.
 - Om din mens har gått över tiden, testa igen om 3 dagar. Om testet visar resultatet "Inte gravid" och du inte har fått din mens ändå, ska du kontakta din läkare.

TESTFEL

Testfel - boken i displayern - ett fel uppstod under testet. Detta kan bero på att:

- Den absorberande provdelen inte hölls riktad nedåt, eller att testet inte lades på en plan yta efter att urinprovet tillfördes.
- För mycket eller för litet urin tillfördes.
- Om du gör om testet med ny sticka och se till att följa instruktionerna nog.

Testfel - blankt display - Om skärmen är blank efter att du har använt testet, kontakta Clearblue kundtjänst för närmare information.

KASSERING AV TESTET

- Innan du kasserar testet, ska du ta bort batterier från provstickan. Sätt ett mynt i skåran i änden och vid om så att bakstycket på provstickan öppnas.
- Ta ur batteriet och kassera det enligt gällande återvinningsrutiner. **Varning:** Batterier får inte öppnas, laddas om eller kasseras i öppen eld. Får ej förtäras. Förvaras ötkomligt för barn.
- Kassera resten av provstickan enligt gällande återvinningsrutiner för elektrisk utrustning.
- Släng inte elektrisk utrustning i öppen eld.



0843

Denna enhet uppfyller kraven för elektromagnetisk utsläpp enligt EN61326. Det elektromagnetiska utsläppet är däremot lågt. Störningar från annan elektrisk utrustning förväntas inte. Detta test ska inte användas i närheten av stark elektromagnetisk strålning från t.ex. mobiltelefoner, eftersom det kan medföra att testet inte fungerar som det ska. Undvik elektrostatisk urladdning genom att inte använda testet i mycket torrt miljö, i synnerhet där det finns syntetiska material. Graviditetstest för hembruk. Ej avsett för invarter bruk. Förvaras ötkomligt för barn. Låt enheten anta rumstemperatur under 30 minuter om den kylförvarats. Använd inte testet om provstickans foliepackning är skadad. Använd inte provstickan efter utgångsdatumet. Ett batteri ingår i den här produkten. Kassera det enligt lokala bestämmelser. Dessa instruktioner avser modell nummer 790036



0771-79 00 00

Samtal kostar som ett lokalsamtal och kan variera beroende på operatör. Vänligen ha ditt ID-nummer tillgängligt. Samtal kan spelas in för utbildning och kvalitetskontroll.

www.clearblue.com

© 2011 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH. Med ensamrätt. Clearblue är ett varumärke.

Tillverkare: SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Schweiz. Marknadsför av: Procter & Gamble, Sverige AB, Box 27303, 102 54 Stockholm.

IVD	In vitro-diagnostisk medicinsk enhet	LOT	Partikod		Får ej återanvändas.
	Temperaturbegränsning 2°C - 30°C.		Utgångsdatum		Tillverkare